



CATÁLOGO 2020

SOLUCIONES
IMPLANTO PROTÉSICAS
FACIALES EN PMMA





SOLUCIONES IMPLANTO PROTÉSICAS FACIALES EN PMMA



INTRODUCCIÓN



PRESENTACIÓN DEL IMPLANTE:

Los implantes faciales stock Arcomed vienen en un envase con su correspondiente sello de calidad, producto de un exhaustivo control previo a empaquetamiento y despacho.

Este envase NO es esterilizable y el implante NO viene estéril. Para una adecuada esterilización, favor consultar manual adjunto.

La manipulación quirúrgica de estos implantes es de exclusiva responsabilidad del especialista tratante.

En caso de necesitar retirar el implante, este puede ser desinfectado y reesterilizado para volver a utilizarse.



MANIPULACIÓN QUIRÚRGICA:

Los implantes faciales stock Arcomed están fabricados pensando en una cómoda y sencilla manipulación durante una intervención quirúrgica. Se recomienda el desgaste cuidadoso de estos mediante el uso de un fresón de carbide, discos de corte o una fresa cilíndrica estéril.


Dado que el implante produce residuos al desgastarse, se recomienda la cobertura del área operatoria para evitar ensuciarla.



ESTABILIZACIÓN DEL IMPLANTE:

Los implantes faciales stock Arcomed, deben ser siempre fijados con tornillos directamente al tejido óseo.


Perforaciones pueden realizarse sin problemas a los implantes, utilizando sistemas 2.0 o 1.5 según preferencia del cirujano.

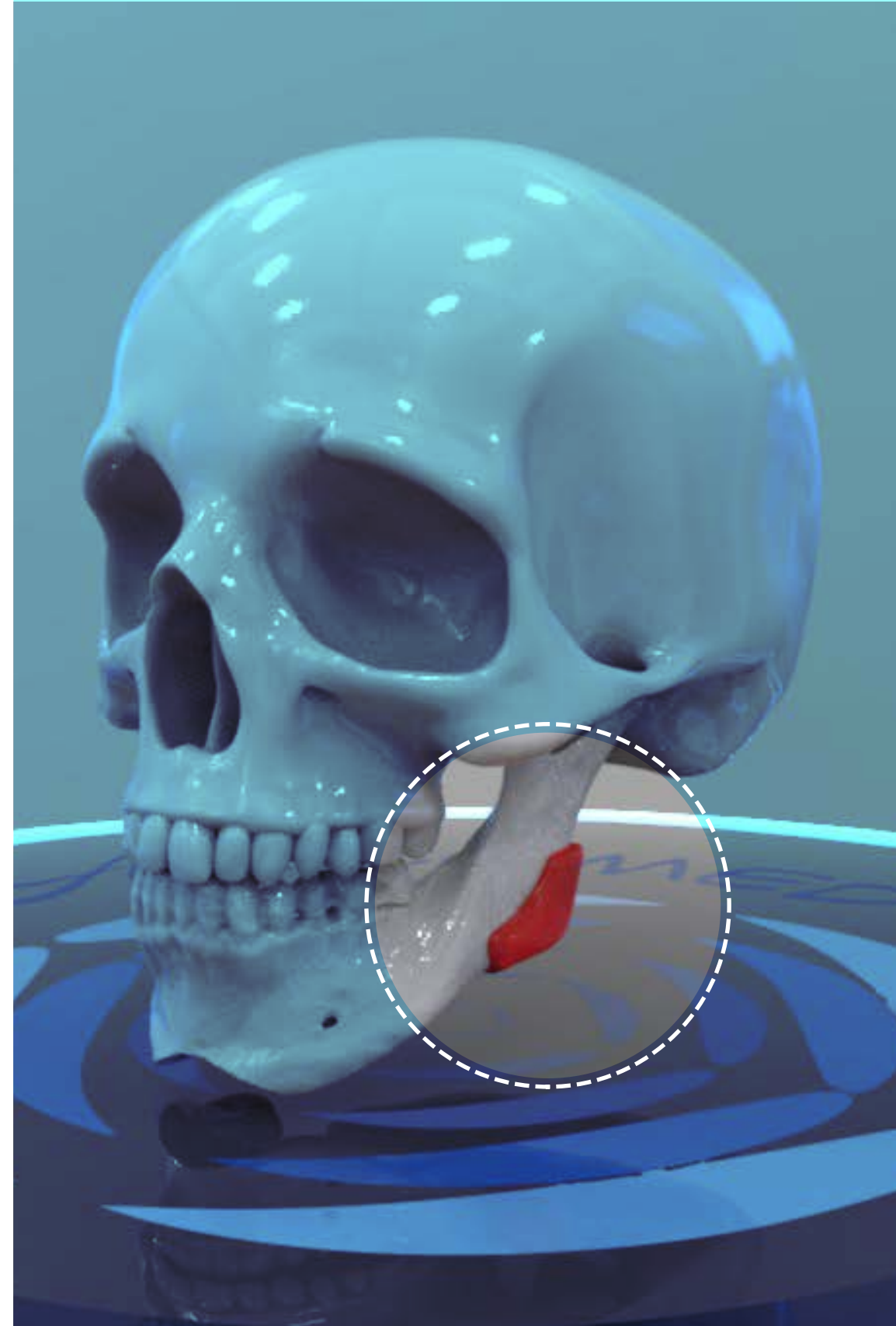

IMPLANTES ESTÉTICOS Y RECONSTRUCCIÓN FACIAL


1 ÁNGULO MANDUBULAR COD ARC13




| | A | B | C |
|--------------------------------|------|------|-------|
| Ángulo izquierdo pequeño | 57mm | 39mm | 5.0mm |
| Ángulo derecho pequeño | 57mm | 39mm | 5.0mm |
| Ángulo izquierdo mediano | 57mm | 39mm | 7.5mm |
| Ángulo derecho mediano | 57mm | 39mm | 7.5mm |
| Ángulo izquierdo grande | 57mm | 39mm | 10mm |
| Ángulo derecho grande | 57mm | 39mm | 10mm |

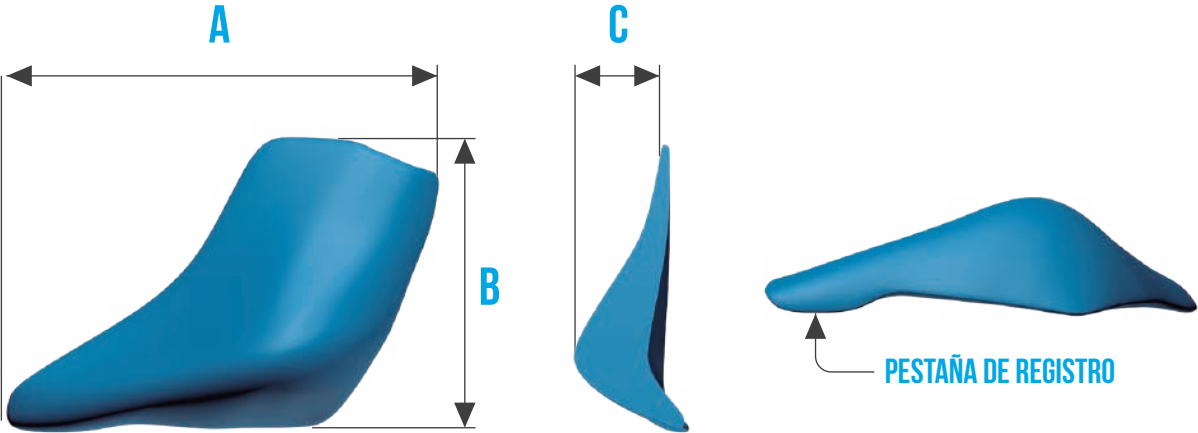

2 MENTÓN SEGMENTADO COD ARC14

| | A | B | C |
|----------------------|------|------|-------|
| Mentón pequeño | 35mm | 32mm | 4.0mm |
| Mentón mediado | 37mm | 32mm | 6.0mm |
| Mentón largo | 40mm | 32mm | 9.0mm |

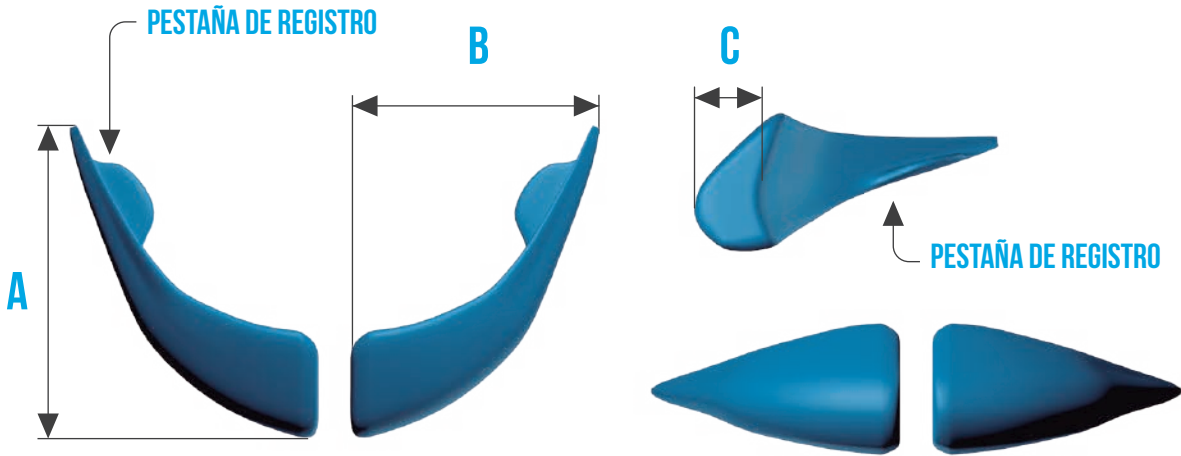

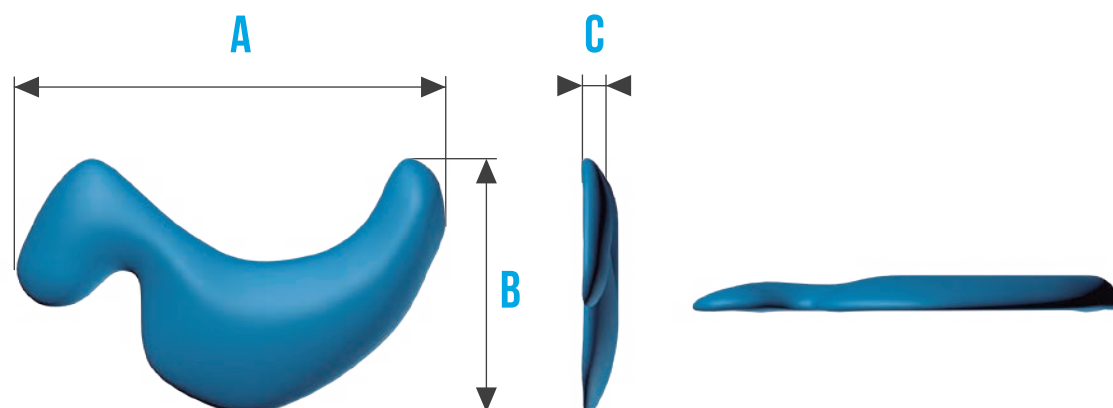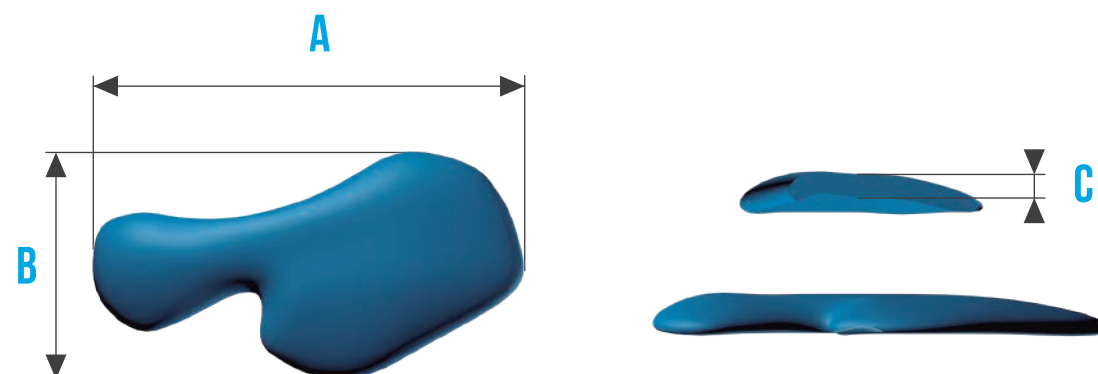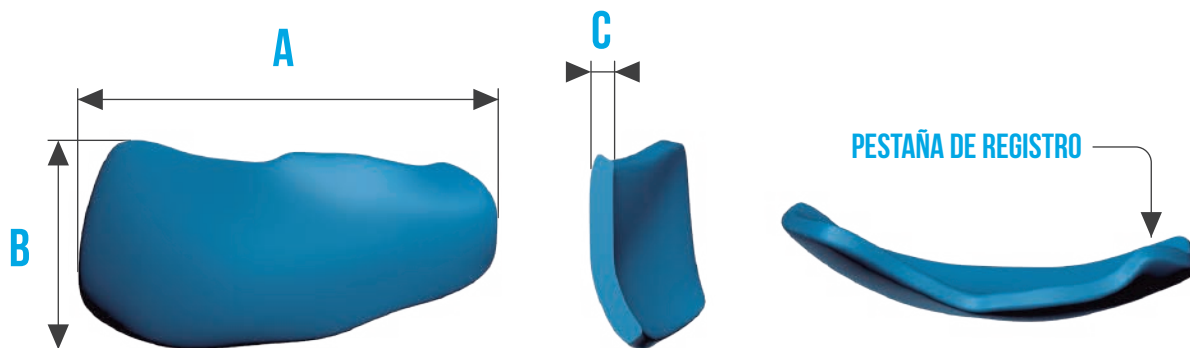

3

CIGOMA

COD ARC15

A B C

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Malar izquierdo pequeño | 52mm x 26mm x 2.5mm |
| Malar derecho pequeño | 52mm x 26mm x 2.5mm |
| Malar izquierdo mediano | 52mm x 27mm x 2.5mm |
| Malar derecho mediano | 52mm x 27mm x 2.5mm |
| Malar izquierdo grande | 52mm x 28mm x 2.5mm |
| Malar derecho grande | 52mm x 28mm x 2.5mm |

4

INFRAORBITARIO 1

COD ARC16

A B C

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Orbital inferior derecho | 48mm x 25mm x 2.0mm |
| Orbital inferior izquierdo | 48mm x 25 mm x 2.0mm |

5

INFRAORBITARIO 2

COD ARC17

A B C


| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Orbital inferior derecho | 53mm x 31mm x 2.0mm |
| Orbital inferior izquierdo | 53mm x 31mm x 2.0mm |

A B C

Mentón pequeño 62mm x 27mm x 5.0mm


Mentón mediano 64mm x 32mm x 7.0mm



Mentón grande 64mm x 36mm x 9.0mm

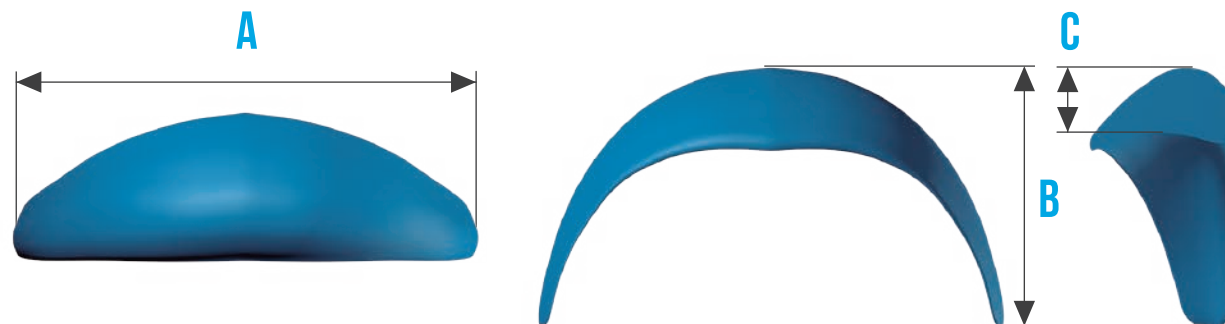

A B C

Implante pequeño 34mm x 19mm x 2.0mm

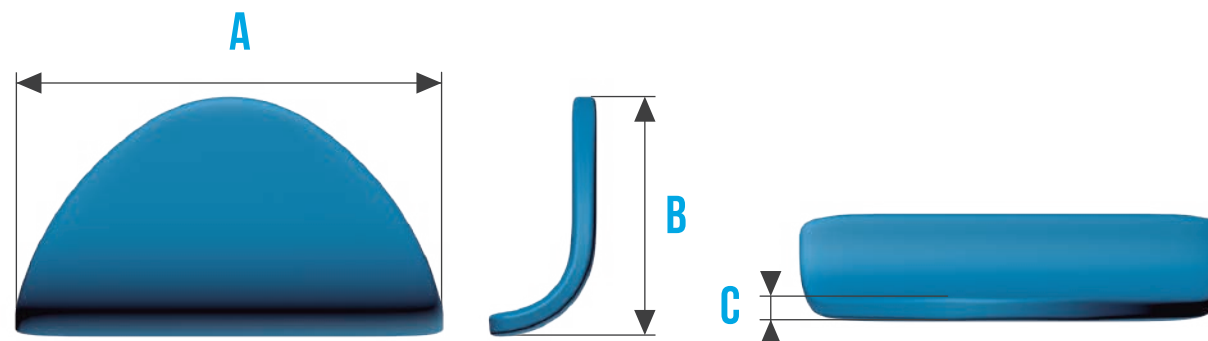

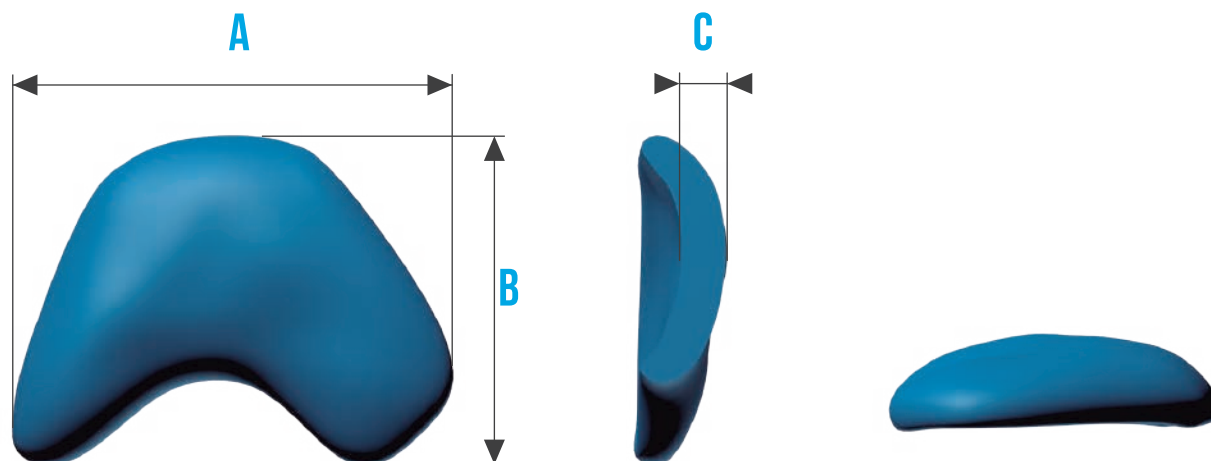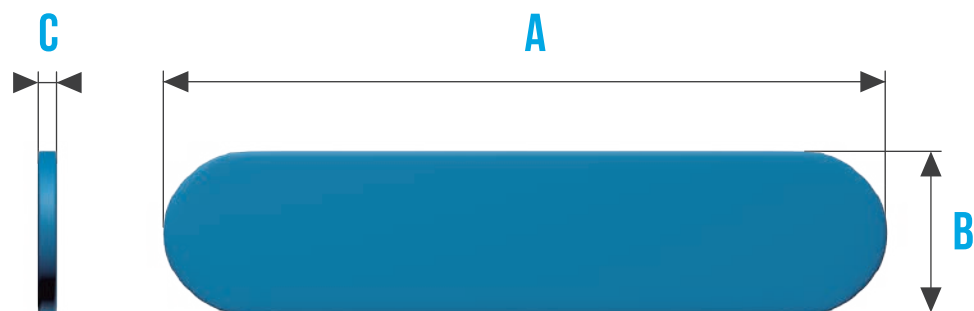

8

BANDA NASAL

COD ARC20

| | A | B | C |
|-------------------|------|-----|-------|
| Banda nasal | 40mm | 9mm | 1,1mm |

9

PARANASAL

COD ARC21

| | A | B | C |
|-----------------------------------|------|------|-------|
| Paranasal pequeño izquierdo | 29mm | 19mm | 6.0mm |
| Paranasal pequeño derecho | 29mm | 19mm | 6.0mm |
| Paranasal grande izquierdo | 35mm | 26mm | 9.0mm |
| Paranasal grande derecho | 35mm | 26mm | 9.0mm |

SOLUCIONES IMPLANTO PROTÉSICAS FACIALES EN PMMA

